

Software sistema di gestione delle chiamate nelle strutture sanitarie e ospedaliere

Il nuovo sistema Call-way **conforme alla norma VDE0834-1-2**, consente di realizzare in ambito ricettivo assistenziale, impianti di gestione e supervisione delle chiamate e la comunicazione da parte dei pazienti e/o personale medico e paramedico verso i locali di presidio, verso altre camere e reparti e verso ambienti esterni alla struttura ospedaliera.

In questa sezione è reso disponibile al download l'applicativo che consente di effettuare, mediante il PC, la configurazione/manutenzione dell'intero sistema e l'utilizzo di molteplici funzioni la cui gestione dipende dai terminali di camera che si è scelto di utilizzare.

Il software permette di realizzare le seguenti applicazioni:

- configurazione sistema;
- manutenzione;
- visualizzazione degli eventi (chiamate, guasti, storico eventi).

Configurazione moduli

Visualizza Configurazione geografia Configurazione moduli Strumenti

Geografia Moduli Conferma ☐ Applica modifiche solo al database ☒ Aggiorna automaticamente Reset modulo Uscita

Elenco ADL Reset Aggiorna

ADL
100003 255.255.255.255 10250
100007 255.255.255.255 10250
10000F

Dati dispositivo

Id: 704202 Firmware: 13052891 Test

Reparto: 42 Stanza: 02 Bus fonia: 0 Bus annunci: 0

☐ Display di presidio ☐ Disabilitazione pulsante presenza display

☒ Cicalino di conferma chiamata in caso di PC off-line

☐ La presenza annulla la chiamata bagno

☒ Ripetizione beep di conferma chiamata dalle stanze, in caso di PC guasto

Intervallo ripetizione avviso con lista di chiamate attiva: 2 Unità di misura 20 Sec (1 - 255) Alias:

Lunghezza beep: 1 Unità di misura 1/100 sec (1 - 255)

Fonia	Chiamate	Tipologia (N.C.)	Ign. guasto	Alias
<input type="checkbox"/> Abilitato	1 - <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Hands Free	2 - <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Conf. di default	3 - <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Volume 5	4 - <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Configurazione ingressi: L1 - L2 - B - R Tipologia reset bagno: ☒ Annulla b. ☐ Reset

Lampade

Ign. guasto: ☒ Verde ☒ Bianca ☒ Rossa

Nota: La configurazione dell'accoppiatore di linea art. 02094 avviene mediante il configuratore della Lantronix al link: www.lantronix.com/support/downloads/?=DEVICEINSTALLER.